

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CABOS E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO	CÓDIGO PO.CME.001	REVISÃO: 00
		PÁGINA 1/3

1. OBJETIVO

Descrever o processo da limpeza e da desinfecção do cabo e da lâmina do laringoscópio com a finalidade de garantir a sua reutilização de forma segura para o paciente/cliente.

2. RESPONSABILIDADES

2.1 Elaboração e revisão: Enfª Helena Serviuc, Enfª Tatiane Florentino, Enfª Julia Moscovits, Enfª Lailla Farias e Dr. Murilo Marques.

2.2 Execução: Todos os profissionais de enfermagem envolvidos no processo operacional na unidade do Hospital de Brotas.

3. DEFINIÇÕES

EPI: Equipamentos de Proteção Individual.

4. PÚBLICO-ALVO

Equipe assistencial das unidades geridas pelo INTS.

5. PROCEDIMENTO/ PROCESSO**5.1 MATERIAL A SER UTILIZADO:**

- 01 Par de luvas de procedimento;
- 01 Máscara cirúrgica;
- Esponja não abrasiva;
- Álcool 70%;
- Pano limpo;
- Saco descartável ou caixa específica.

5.2 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

- Lavar as mãos, POP LAVAGEM DAS MÃOS;
- Paramentar-se com os EPIs;
- Desmontar o Laringoscópio: desconectar a lâmina do cabo do laringoscópio e retirar a pilha do laringoscópio (fechar a tampa em seguida);
- Retirar a lâmpada da lâmina e friccionar álcool 70% por 30 segundos;
- Lavar a lâmina do laringoscópio com esponja macia na solução de água e detergente líquido enzimático, retirando qualquer resíduo que estiver presente (não deixar de molho);
- Enxaguar a lâmina abundantemente com água corrente;
- Secar a lâmina com um campo ou compressa limpa;
- Friccionar álcool a 70% na lâmina por três vezes e deixar secar espontaneamente;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL		
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CABOS E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO	CÓDIGO PO.CME.001	REVISÃO: 00
		PÁGINA 2/3

- Limpar o cabo do laringoscópio externamente com um campo ou compressa umedecida em solução de água e detergente enzimático;
- Remover a solução com auxílio de um pano umedecido em água;
- Secar o cabo do laringoscópio com um campo limpo;
- Secar novamente as peças com ar sob pressão, principalmente nos locais onde há componente eletrônico;
- Friccionar álcool a 70% no cabo por três vezes e deixar secar espontaneamente;
- Montar lâmina do laringoscópio ao cabo e testar seu funcionamento;
- Guardar o laringoscópio desmontado em recipiente limpo e seco com tampa ou saco plástico transparente;
- Identificar com data de preparo e data de validade (validade de 7 dias) e nome do colaborador;
- Organizar o setor fazendo a lavagem e desinfecção de esponjas, escovas, pias e bancadas;
- Descartar panos e toalhas utilizadas;
- Retirar os EPI's, descartando os equipamentos de uso único e procedendo a limpeza e desinfecção dos equipamentos de múltiplo uso.

OBSERVAÇÕES

- Se apresentar defeito, fazer a troca da pilha se mesmo assim não funcionar, encaminhar para a manutenção.
- Não colocar para uso caso não esteja funcionando. Comunicar a enfermeira do setor.

6. REFERÊNCIAS

EBSERH. **Limpeza E Desinfecção De Cabos E Lâminas De Laringoscópio**. Paraíba: João Pessoa, 2020. Disponível em: [POP - CME.pdf](#). Acesso em: 20. mai. 2022.

BRASIL. **Resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012**. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. **MANUAL DE NORMAS E ROTINAS PARA O PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE**. 2021. Disponível em <Manual_Normas_Rotinas_para_Proc_Prod_Saude.pdf (campinas.sp.gov.br)>. Acesso em 17/02/23.

7. CONTROLE DE REGISTRO

Não aplicável.

8. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Elaborado/revisor por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CABOS E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO	CÓDIGO PO.CME.001	REVISÃO: 00
		PÁGINA 3/3

00	Helena Serviuc/ Lailla Farias	20/06/2023	Emissão inicial	Tatiane Florentino e Júlia Moscovits	21/06/2023
----	-------------------------------	------------	-----------------	---	------------

Elaborado por:

Aprovador por:

Nome

Cargo

Nome

Cargo

9. ANEXO

Não aplicável.