

PROCEDIMENTO OPERACIONAL**MANUSEIO DA SELADORA****CÓDIGO
PO.CME.002****REVISÃO: 00****PÁGINA 1/3****1. OBJETIVO**

Descrever o processo do manuseio da seladora com o objetivo de garantir o funcionamento adequado do aparelho a fim de assegurar que os materiais sejam preparados de forma correta e evitar perda de material.

2. RESPONSABILIDADES

2.1. Elaboração e revisão: Enf^a Helena Serviuc, Enf^a Tatiane Florentino, Enf^a Julia Moscovits, Enf^a Laila Farias e Dr. Murilo Marques.

2.2. Execução: Todos os profissionais de enfermagem envolvidos nos processos operacionais da unidade (C.M.E.).

3. DEFINIÇÕES

EPI: Equipamentos de Proteção Individual.

4. PÚBLICO-ALVO

Todos os profissionais em assistência na Maternidade.

5. PROCEDIMENTO/ PROCESSO**5.1 RECURSOS/ MATERIAIS UTILIZADOS**

- 01 Par de luvas de procedimento;
- 01 Máscara cirúrgica;
- 01 gorro/touca;
- 01 par de sapatos fechados;
- Papel grau cirúrgico;
- Seladora.

5.2 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- Lavar as mãos, POP LAVAGEM DAS MÃOS;
- Paramentar-se com os EPIs, POP PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO NA C.M.E.;
- Preparar o setor para o início das atividades verificando se todos os insumos e todos os tamanhos de sistema de barreira estéril estão disponíveis e aptos para uso;
- Realizar limpeza e desinfecção das mesas, bancadas e armários com álcool a 70% antes de iniciar as atividades.
- Conectar o cabo de força da seladora na rede elétrica, conforme orientação do fabricante (127 ou 220 V);
- Ligar a seladora para iniciar o aquecimento;
- Ajustar a temperatura em 150° C ou conforme recomendação do fabricante, para papel grau cirúrgico utilizando os botões de ajuste;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL		
MANUSEIO DA SELADORA	CÓDIGO PO.CME.002	REVISÃO: 00
		PÁGINA 2/3

- Aguardar o aquecimento do aparelho;
- Realizar o ajuste das embalagens duplas, a embalagem interna (primária) deve ter tamanho menor, para evitar dobras e sobras no papel, devem ser acomodadas de forma que a face plástica da embalagem primária esteja voltada para a face plástica da embalagem secundária, permitindo a visualização do produto. Assim como as partes de papel devem estar face a face de modo a garantir a penetração e a remoção do agente esterilizante e do ar, além de não comprometer a secagem do material, considerando que a face de papel é permeável ao agente esterilizante;
- Manter na dupla embalagem, ambos os invólucros com o mesmo sentido da indicação da seta de abertura, para não comprometer abertura asséptica e ocasionar liberação de fibras no material estéril;
- Cortar o papel grau cirúrgico de modo que o material fique bem-acondicionado, evitando pacotes muito grandes com desperdício de embalagem ou muito pequenos (pacotes repuxados) em relação ao tamanho do material a ser acondicionado, garantindo uma embalagem que não comprometa o processo de esterilização, permitindo o transporte, armazenamento e manuseio do material sem risco de contaminação;
- Ajustar o guia de posição na lateral esquerda da seladora de maneira que a selagem dê uma margem de, no mínimo, 03 cm de borda e permita abertura asséptica;
- Acionar a chave do motor de rolagem, botão verde;
- Tirar todo o ar da embalagem quando for preparar;
- Introduzir o material a ser impermeabilizado pela fenda lateral esquerda da máquina, com a face laminada (filme) voltada para cima, observando se está se encontra totalmente plana e sem dobras com a parte do papel, e retirá-lo pela fenda lateral direita da máquina;
- Conferir a qualidade da selagem após esfriamento.

OBSERVAÇÕES

- Quando temperatura baixa, o papel se desprende da parte laminada, significa que deverá aumentar a temperatura ou aguardar mais tempo para o aparelho esquentar.
- Quando temperatura alta, o papel apresenta sinais de queima (marrom), significa que a temperatura está acima do indicado.

6. REFERÊNCIAS

IPSEMG. Protocolo da CME – Central de Material e Esterilização. **Manuseio da Seladora**. Minas Gerais. Disponível em: [pop_cme - 013_manuseio_de_seladoras_2021.pdf](#). Acesso em: 20.mai. 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. **MANUAL DE NORMAS E ROTINAS PARA O PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE**. 2021. Disponível em

PROCEDIMENTO OPERACIONAL		
MANUSEIO DA SELADORA	CÓDIGO PO.CME.002	REVISÃO: 00
		PÁGINA 3/3

<[Manual Normas Rotinas para Proc Prod Saude.pdf \(campinas.sp.gov.br\)](#)>. Acesso em 17/02/23.

7. CONTROLE DE REGISTRO

Não aplicável.

8. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Elaborado/revisor por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	Helena Serviuc/ Lailla Farias	21/06/2023	Versão 02	Tatiane Florentino e Júlia Moscovits	22/06/2023

Elaborado por:

Aprovador por:

Nome

Cargo

Nome

Cargo

9. ANEXO

Não aplicável.