



PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PREPARO E UTILIZAÇÃO DO DETERGENTE ENZIMÁTICO

CÓDIGO
PO.CME.006

REVISÃO: 00

PÁGINA 1/3

1 OBJETIVO

Descrever o preparo e a utilização do detergente enzimático com a finalidade de garantir a remoção da sujidade e a quebra de grande parte dos microorganismos e prevenir a infecção hospitalar.

2 RESPONSABILIDADES

2.1 ELABORAÇÃO E REVISÃO: Enf^a Helena Serviuc, Enf^a Tatiane Florentino, Enf^a Julia Moscovits, Enf^a Lailla Farias e Dr. Murilo Marques.

2.2 EXECUÇÃO: Todos os profissionais de enfermagem envolvidos nos processos operacionais da unidade (C.M.E.).

3 DEFINIÇÕES

EPI: Equipamentos de Proteção Individual.

4 PÚBLICO-ALVO

Equipe de enfermagem em CME das unidades geridas pelo INTS.

5 PROCEDIMENTO/ PROCESSO

5.1 RECURSOS/ MATERIAIS UTILIZADOS:

- 01 Par de luva de borracha cano longo;
- 01 Par de luvas de procedimento;
- 01 Óculos de Proteção/ *Face shield*;
- 01 Máscara cirúrgica;
- 01 gorro/touca;
- 01 par de sapatos fechados impermeáveis e antiderrapantes;
- 01 avental impermeável de manga longa com gramatura de 50 g/m²;
- Recipiente próprio de plástico;
- Jarra com medidor graduado;
- Seringa de 20ml;
- Solução de Detergente Enzimático;
- Água limpa;
- Ficha de Controle de Troca de Enzimático.

5.2 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO:

- Lavar as mãos, POP LAVAGEM DAS MÃOS;
- Paramentar-se com os EPIS, POP PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO NA C.M.E.;
- Conferir padrão de diluição, prazo de validade e tempo de imersão de acordo com fabricante;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PREPARO E UTILIZAÇÃO DO DETERGENTE ENZIMÁTICO	CÓDIGO PO.CME.006	REVISÃO: 00
		PÁGINA 2/3

- Realizar a diluição dentro de um recipiente próprio utilizando a jarra com medidor graduado e a seringa de 20ml (01 ml de Detergente Enzimático para 01 L de água limpa) ou conforme orientação do fabricante;
- Assinar e preencher ficha de Controle de Troca de Enzimático;
- Colocar todas as pinças abertas e/ou materiais desmontados dentro do recipiente;
- Garantir que todos os materiais estejam imersos na solução;
- Deixar o tempo de imersão conforme orientação do fabricante;
- Realizar a lavagem dos materiais conforme POP LIMPEZA DO MATERIAL SUJO NA C.M.E.
- Realizar enxague de forma abundante para a retirada total da sujidade e do detergente enzimático;
- Realizar a troca da solução sempre que necessário, quando estiver saturada ou ao término do trabalho;
- Se a solução saturar, é recomendado realizar nova diluição para não comprometer a limpeza;
- Assinar ficha de Controle de Troca de Enzimático sempre quando preparado e quando desprezado.

OBSERVAÇÕES

- Solicitar orientação do enfermeiro sempre que houver dúvidas na execução das atividades.
- Não deixar saturar a solução. Quando necessário, realizar a troca.

6 REFERÊNCIAS

UFPR. Universidade Federal do Paraná. **Diluição Da Solução De Detergente Enzimático**. Curitiba: PR. Disponível em: [12-POP-DILUIÇÃO-DE-SOLUÇÃO-DE-DETERGENTE-ENZIMÁTICO.pdf \(ufpr.br\)](#). Acesso em: 07.05.2022.

BRASIL. **Resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2012.

Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC). **Diretrizes de Práticas em Enfermagem Cirúrgica e Processamento de Produtos para Saúde**. 8 ed. São Paulo: SOBECC; 2021.

7 CONTROLE DE REGISTRO

Não aplicável.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PREPARO E UTILIZAÇÃO DO DETERGENTE ENZIMÁTICO

**CÓDIGO
PO.CME.006**

REVISÃO: 00

PÁGINA 3/3

8 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Elaborado/revisor por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	Helena Serviuc/ Lailla Farias	20/06/2023	Emissão inicial	Tatiane Florentino e Júlia Moscovits	22/06/2023

Elaborado por:

Aprovador por:

Nome

Cargo

Nome

Cargo

9 ANEXO

Não aplicável.