

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

ARMAZENAMENTO E DESCARTE DE AMOSTRAS

CÓDIGO:
PO.ATRA.002

REVISÃO: 00

PÁGINA:1/2

1. OBJETIVO

Orientar e descrever o procedimento para realização do correto armazenamento e descarte de amostras coletadas de pacientes.

2. RESPONSABILIDADES

2.1 ELABORAÇÃO E REVISÃO: Allana Rúbia, Ana Paula Adan, Aline Dórea, Mariana Cerqueira, Tatiane Florentino, Lailla Farias, Júlia Moscovits, Leonardo Azevedo e Murilo Marques.

2.2 EXECUÇÃO: Biomédicos da Agência Transfusional das unidades de saúde sobre gestão do INTS.

3. DEFINIÇÕES

Não aplicável.

4. PÚBLICO-ALVO

Colaboradores da Agência Transfusional dos serviços geridos pelo INTS.

5. PROCEDIMENTO / PROCESSO**5.1 RECURSOS / MATERIAIS UTILIZADOS:**

Não aplicável.

5.2 ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS TRABALHADAS:

- Após realização dos testes pré-transfusionais armazenar as amostras trabalhadas devidamente fechadas na geladeira;
- Acondicionar as amostras na galeria específica de acordo a cada dia da semana trabalhado;
- Em se tratando de amostras do teste de compatibilidade deverá ser guardado junto com os tubos o macarrão da bolsa testada;
- As estantes com amostras deverão ficar no compartimento da geladeira destinada para este fim;
- As amostras ficarão armazenadas por 7 dias.

5.3 DESCARTE DAS AMOSTRAS:

- Ao iniciar o plantão realizar leitura do relatório de ocorrência, no Livro de Ocorrência,

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

ARMAZENAMENTO E DESCARTE DE AMOSTRAS

CÓDIGO:
PO.ATRA.002

REVISÃO: 00

PÁGINA:2/2

para ver se existe alguma restrição para descarte das amostras.

- Verificar no suporte plástico a data referente ao dia da semana trabalhado e se já está na data para descartar as amostras.
- Conferir a identificação das amostras verificando a data da coleta e prosseguir o descarte das mesmas no lixo de material biológico infectante se estiver no período do descarte.
- Registrar no Livro de Ocorrência o descarte das amostras identificando a data e/ou dia da semana.

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. Portaria N° 1.353, de 13 de Junho de 2011. Aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos.

7. CONTROLE DE REGISTRO

Não aplicável.

8. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

Revisão	Elaborado/revisado por	Data	Histórico de alteração	Aprovado por	Data
00	Allana Rubia Coelho, Ana Paula Adan e Aline Dórea	05/07/23	Emissão inicial	Tatiane Florentino, Laila Farias, Júlia Moscovits, Leonardo Azevedo e Murilo Marques	01/09/23

Elaborado por:

Aprovador por:

Nome
Cargo

Nome
Cargo

9. ANEXO

Não aplicável.