

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

TESTE DO LARINGOSCÓPIO

CÓDIGO:
PO.ENF.027

REVISÃO: 00

PÁGINA:1/3

1. OBJETIVO

Verificar o funcionamento do laringoscópio .

2. DEFINIÇÕES

Não se aplica.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 ELABORAÇÃO E REVISÃO: Jéssica Aparecida Lacerda, Tamyris Rodrigues, Lailla Farias, Tatiane Florentino e Júlia Moscovits.

3.2 EXECUÇÃO: Equipe de enfermagem.

4. PÚBLICO ALVO

Pacientes admitidos na unidade.

5. PROCEDIMENTO / PROCESSO

- Higienizar as mãos conforme boas práticas de higiene das mãos;
- Verifique a presença das duas peças do laringoscópio;
- Encaixe firmemente a Lâmina do laringoscópio ao cabo;
- Certifique que a lâmpada se acende e verifique a qualidade da luz (a luz não pode estar fraca/ amarelada);
- Desencaixe as partes e teste as demais lâmpadas;
- Guarde todas as peças no respectivo estojo;
- A conferência na planilha de registro.

- **RESULTADOS ESPERADOS:**

Manter o laringoscópio funcionando corretamente, garantindo uma assistência livre de danos;

- **RISCOS INERENTES À TÉCNICA:**

Não se aplica.

5.1 RECURSOS / MATERIAIS UTILIZADOS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

TESTE DO LARINGOSCÓPIO

CÓDIGO:
PO.ENF.027

REVISÃO: 00

PÁGINA: 2/3

Duas pilhas médias.

6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES/REFERÊNCIAS:

- M.A Arain & Brothers PVT. Ltd. Instrução de Uso do Laringoscópio Convencional Reutilizável.
<http://www.igmoriya.com.br/arquivos/280313022943Instrucao%20%deUso/LARINGOSCOPIO%20%CONVENCIONAL%20REUTILIZÁVEL.pdf>

7. CONTROLE DE REGISTRO

Não se aplica.

8. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão	Elaborado/revisado por	Data	Histórico da revisão	Aprovado por	Data
00	Jéssica Aparecida Lacerda e Tamyris Rodrigues	28/11/2023	Emissão inicial	Lailla Farias, Tatiane Florentino e Júlia Moscovits.	01/12/2023